

## Instrukcja stosowania wyrobu medycznego AXOBIOTIC® KATAR MAMA.

Przed użyciem wyrobu medycznego należy zapoznać się z treścią ulotki informacyjnej zawierającej instrukcję użycia, a w razie dodatkowych pytań skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

# AXOBIOTIC®

## katarMama

WYRÓB MEDYCZNY



### Wskazania:

Dedykowany do łagodzenia podrażnień błon śluzowych, optymalnego nawilżenia przesuszonych błon śluzowych jam nosowych, wspomagania leczenia infekcji nosa i zatok.

### Zakres działania:

Nawilżające, uelastyczniające, regenerujące, pielęgnujące, powlekające, antybakteryjne.

- oczyszcza i nawilża błony śluzowe
- łagodzi podrażnienia nosa i zatok
- ułatwia oddychanie
- tworzy barierę przed drobnoustrojami

### Sposób działania:

Wyrób medyczny aXobiotic® Katar Mama wykazuje wysoką skuteczność dzięki innowacyjnej formule aXovelum®, łączącej działanie chitozanu oraz cząstek metali szlachetnych aXonnite®. Spray tworzy na śluzówce jam nosowych naturalną powłokę ochronną izolującą błony śluzowe przed działaniem bakterii, wirusów i grzybów i tym samym zapobiega ich kolonizowaniu. Obecne w preparacie miedź oraz złoto aXonnite® zabezpieczają wyrób przed rozwojem mikroorganizmów chorobotwórczych. Preparat udrażnia górne drogi oddechowe, redukuje wydzielinę z nosa i ułatwia oddychanie.

### Skład:

Woda, chitozan, pantenol, miedź aXonnite®, złoto aXonnite®, ekstrakt z liści eukaliptusa, olejek z liści eukaliptusa. **Substancje pomocnicze:** gliceryna, mleczan sodu, kwas mlekowy, kaprylan poliglicerolu-6, kaprylan poliglicerolu-4.

**Pojemność:** 30 ml

### Instrukcja stosowania:

Przed użyciem wstrząsnąć; aplikować do nosa kilka razy dziennie albo według zaleceń lekarza. Stosować profilaktycznie w celu zapobiegania nawrotom infekcji, szczególnie w okresie wzmożonych zachorowań. Produkt polecany w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

### Przykłady zastosowań:

Wspomaga leczenie i łagodzi objawy:

- infekcji bakteryjnych nosa, zatok i błon śluzowych
- podrażnionych błon śluzowych
- kataru
- zatkanego nosa
- trudności w oddychaniu

### Przeciwwskazania:

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik sprayu. Nie są znane przeciwwskazania do stosowania także przez kobiety w ciąży czy w okresie karmienia.

### Działania niepożądane:

Nie są znane żadne działania niepożądane oprócz ewentualnej nadwrażliwości na składniki sprayu.

### Środki ostrożności:

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

### Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze pokojowej oraz miejscach trudno dostępnych dla dzieci.

**Opakowanie:** 30 ml